

# TEST RAPIDE ANTIGÉNIQUE BIOSYNEX COVID-19 AG BSS



## TEST RAPIDE ANTIGÉNIQUE BIOSYNEX COVID-19 AG BSS



- Test immunochromatographique pour le diagnostic rapide de la Covid-19 sous forme de cassette
- Format Kit, ne nécessite ni matériel ni équipement supplémentaire
- A partir de prélèvements nasopharyngés réalisés à l'aide d'écouvillon
- Sensibilité 96% et spécificité de 100%
- Pas de réactivité croisée avec les coronavirus humains (229E, OC43, NL63 et HKU1), l'Influenza A et B et le RSV A et B
- Résultat en 15 minutes
- Certifié CE IVD

### Contenu du kit :

- 25 cassettes de test
- 2 flacons de tampon d'extraction
- 25 écouvillons stériles
- 25 tubes d'extraction
- Portoir
- Notice d'utilisation



Référence	Désignation	Unités/ carton
674200	Test rapide antigénique Biosynex covid-19 Ag BSS	25 cassettes

## RESULTATS




POSITIF




NEGATIF


## PROCEDURE \*

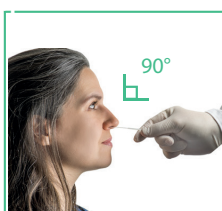


Insérer l'écouvillon **horizontalement** dans la cavité nasale.

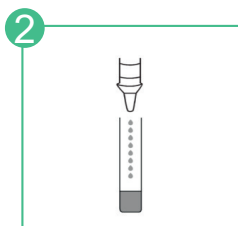


Ajouter 10 gouttes (0,3mL) du tampon d'extraction.

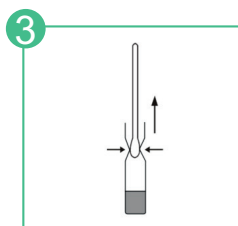

Décharger l'écouvillon dans le tube par des **rotations** de l'écouvillon pendant environ **1 minute**.

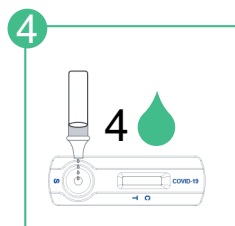

Disposer la tétine sur le tube et déposer **4 gouttes** de solution dans le puits S.

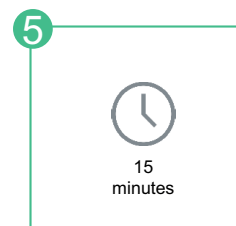

Lire le résultat à **15 minutes**. Ne pas interpréter après 20 minutes.

\*Pour la procédure complète, lire la notice